



## INSTRUCCIONES DE USO: (Español)

### ¿Qué es Hydrogel Pure & Clean?

Pure & Clean Antimicrobial Hydrogel es una solución de próxima generación de cuidado de heridas, diseñada para agregar y mantener la humedad en el lecho de la herida y facilitar el desbridamiento autolítico. El hidrogel antimicrobiano Pure & Clean tiene un amplio perfil de seguridad que no dañará los tejidos sanos y funciona conjuntamente con grupo de productos comunes de cuidado de heridas que ofrecen un enfoque sinérgico para la preparación y el manejo del lecho de la herida.

### ¿Qué diferencia a Pure & Clean ofrece además?

Este hidrogel antimicrobiano de fórmula única utiliza una tecnología (pendiente de patente) que combina el uso de una solución hipoclorosa electroquímicamente producida, con un potenciador de la viscosidad nanoestructurada, y que da como resultado un hidrogel hipoclorítico (HOCL) de grado farmacéutico. La formulación resultante es un hidrogel transparente, pH balanceado, óptimo para una amplia gama de condiciones de herida y piel.

### Indicaciones:

Pure & Clean Antimicrobial Hydrogel es un producto aprobado por la FDA 510 (k) para que los profesionales de la salud manejen los siguientes tipos de heridas: • Heridas agudas y dérmicas • Heridas de espesor parcial y total • Quemaduras de primer y segundo grado • Úlceras diabéticas y estasis úlceras • Úlceras por presión en estadio I-IV • Heridas quirúrgicas (incisiones, sitios de donantes e injertos) • Abrusiones e irritaciones cutáneas • Heridas por trauma • Diversas dermatosis, incluida la dermatitis atópica.

## Instrucciones de uso:

- Limpie la herida con Pure & Clean Wound Irrigation Solution
- Agite bien el Pure & Clean Antimicrobial Hydrogel antes de usar
- Aplicar Pure & Clean Antimicrobial Hydrogel
- Con algunas heridas, es posible que se necesite un relleno para llenar la cavidad
- Cubra la herida con un vendaje para heridas apropiado que contenga Pure & Clean Antimicrobial Hydrogel en el lecho de la herida.
- Cambie el vendaje según lo ordenado o cuando sea necesario. Use Pure & Clean cada cambio de apósito.

**Manipulación:** No tóxico y no irritante para la piel, los ojos o la membrana mucosa. No se requiere manejo especial. No hay instrucciones especiales para su eliminación.

**Seguridad:** Pure & Clean no irrita ni sensibiliza, ya que ha aprobado muchos estudios de biocompatibilidad, incluido el estudio ISO Irritación ocular y la prueba de sensibilidad máxima ISO.

Pure & Clean Antimicrobial Hydrogel contiene ácido hipocloroso, un conocido conservante antimicrobiano, que se sabe que inhibe el crecimiento de microorganismos en el hidrogel